


## Functie Interval Tijd


Druk de "Cycle time" knop in om de gewenste Interval tijd te selecteren. Druk dan op de "start/Stat/Stop" knop om te starten.

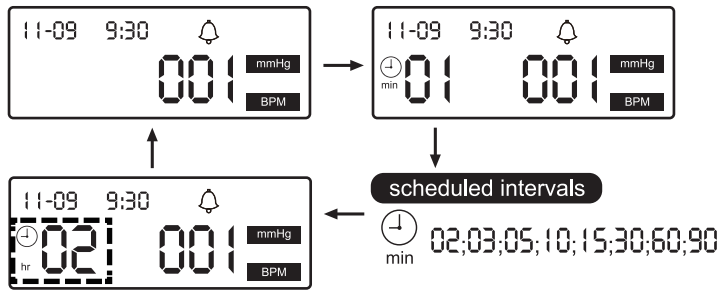

## Functie Interval Tijd

We adviseren om de bijbehorende Cuffs te gebruiken Om het beste resultaat te bereiken.

- A** Voorpoten
- B** Achterpoten
- C** Staart

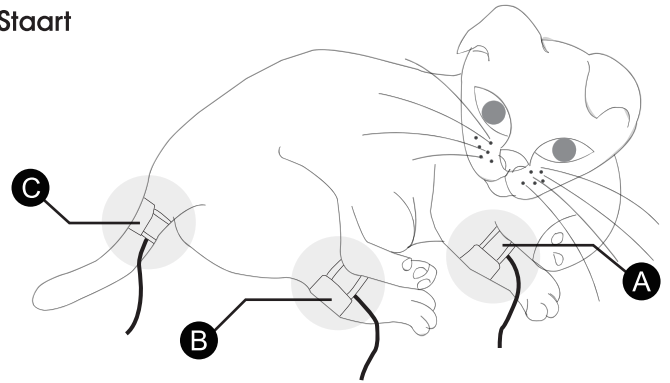


## Slimme Keuze Selectie Cuff

Cuff Maat 2.05 cm, 2.55cm, 3.05 cm, 3.55cm, 4.05cm, 4.55 cm, 5.55cm



## Juiste Plaatsing Cuff


Het is belangrijk om de cuff correct te plaatsen. De cuff moet parallel op het dier geplaatst worden. Met de pijlen kan de cuff juist gepositioneerd worden.

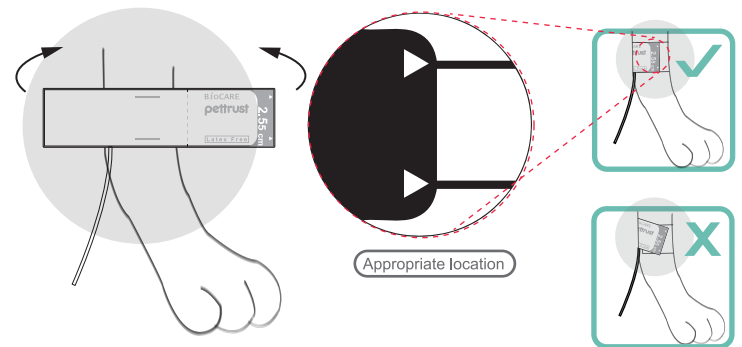

We leveren 7 verschillende grote van cuffs om een juiste meting te verkrijgen. Het is daarom van belang de juiste maat te kiezen.


## Cuff omtrek meter

Je kan de "Cuff omtrek meter" gebruiken om de juiste Cuff maat te selecteren. Gebruik alleen accessoires van BioCare/Delta Medic anders Is het mogelijk dat de monitor niet correct functioneert.

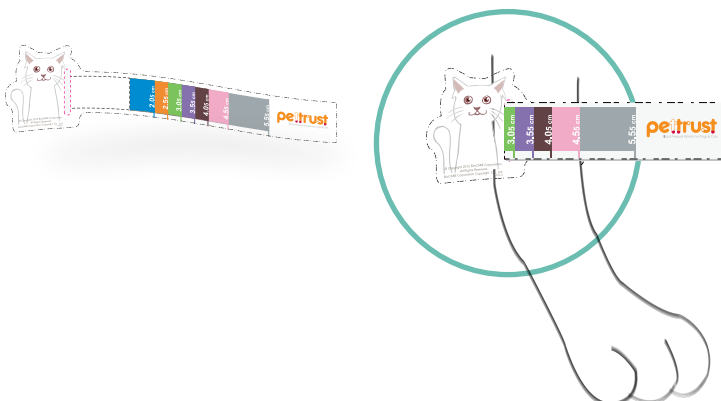

Delta Medic BV  
Lorentzlaan 17, 3401 MX IJsselstein  
The Netherlands  
Tel: +31 (0) 30 - 274 1302  
Email: info@deltamedic.nl  
http://www.deltamedic.nl

**BioCARE Corporation in**  
4F, No. 12, Lane 5, Sec. 2, Nanshan Rd.,  
Lujhu Township, Taoyuan County  
33852, Taiwan

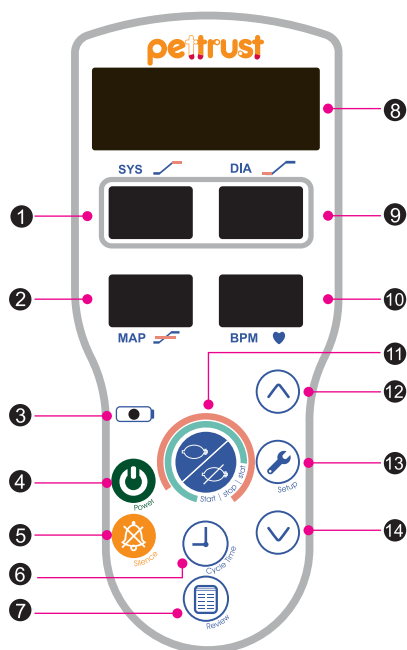

Bloeddruk monitor voor honden en katten


Verkorte Gebruikers Handleiding



Voorziende monitor	Functie
1 <b>sys</b> Systole druk	Systole drukmeting
2 <b>MAP</b> Mean arteriele	Mean arteriële drukmeting
3  Batterij status	1 Rood licht : indicatie nog 100 metingen over. als batterij spanning slecht wordt schakelt monitor uit. 2 Batterij moet dan opgeladen worden. 3 Orange licht L sluit de netspanning aan om batterij te laden.
4  Ana/Uit schakelaar	Druk op de knop om monitor aan te schakelen Druk op de knop voor 5 seconden om monitor uit te schakelen.
5  Alarm stil knop	Druk op deze knop om alarm te onderdrukken
6  Herhaling tijd meting	Druk op deze knop in het NIBP herhaaltijd menu te komen.
7  Trends knop	Druk op deze knop om opgeslagen data te bekijken.

Voorziende monitor	Functie
8  LCD display	LCD display - Weergave meting
9 <b>DIA</b> Diastole druk	Diastole druk meting
10 <b>BPM</b> Hart ritme	Weergave hartslag meting
11  NIBP Start / Stop / Stat	Druk op NIBP startknop voor starten meting Druk nog een keer om meting te stoppen / annuleren Druk knop gedurende 3 seconden voor statische meting
12  Up toets	Druk op deze toets om naar boven te scrollen
13  Setup toets	Druk op deze toets voor instellinggn parameters
14  Down Toets	Druk op deze toets om naar beneden te scrollen


## LCD Scherm

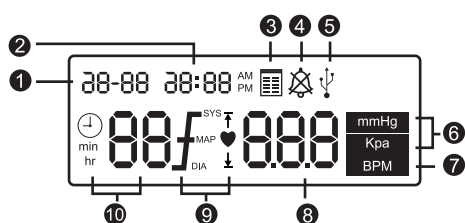

- 1 Datum
- 2 Tijd
- 3 Data review
- 4 Alarm
- 5 USB aansl
- 6 Druk eenheid
- 7 Hartslag
- 8 Data index
- 9 Alarm range symbool
- 10 Cycle tijd

## Starten meting

Druk de "start/Stat/Stop" knop om de meting te starten. Het kan enige seconden duren voordat het signaal wordt opgenomen tijdens de eerste meting.

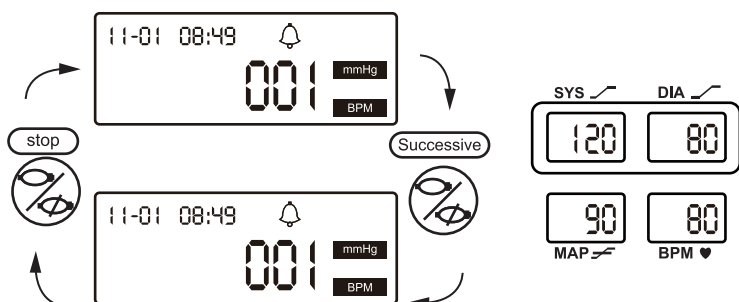

## Starten Statische meting

Druk de "start/Stat/Stop" knop voor 3seconden om de Statische meting te starten. De monitor continueert de bloeddruk gedurende 5 minuten tijdens de "statische mode".

